



DRC 医薬
ハイドロ銀チタン®マスク

ふっつう サイズ
3枚入

+5 **ハウスダスト対策**
通年用




医師が考えたハイドロ銀チタン®マスク

ハウスダスト*・花粉*を
水に変えるマスク

※ハウスダスト / 花粉の中のタンパク質を分解

一年を通してのハウスダスト・花粉対策
掃除をする場合は30分程前からの着用をおすすめします。
ニオイのタンパク質を分解するので数日間使用可能です。

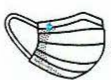

長時間つけても、耳が痛くなりにくい
やわらか無痛ひも(耳かけゴム)採用

細菌・ウイルス・黄砂・
PM2.5 防御フィルター

[ハイドロ銀チタン®製品ラインナップ] 用途にあわせて濃度を変えております。

濃度	ラインナップ	用途	交換目安
強	+12 花粉®・ハウスダスト®対策[超分解]	花粉・ハウスダストが多い場所での適やかな対策	1~7日間
	+8 花粉®ピーク対策[ベリーストロング]	花粉ピーク時のスポーツ・受験時等の使用	1~5日間
	+6 秋花粉®対策[ストロング]	秋に多い花粉(ブタクサ等)への対策	1~5日間
	+5 ハウスダスト®・花粉®対策	一年を通してのハウスダスト・花粉対策	1~5日間
	+4 花粉®対策[レギュラー]	花粉の季節の日常使い・予防	1~3日間
	+3 風邪対策	不衛生タンパク質・ニオイ対策	1~3日間

●+3・+4・+5・+6・+8・+12は、ハイドロ銀チタン®の濃度を示しています。●交換目安は環境・条件によって変化します。※花粉・ハウスダスト・カビ・汗・ニオイ・タンパク質の種類・量によっては分解できないものもあり、使用環境によって効果は異なります。

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

特許第5995100号

DR.C Hyd[AgTiO₂]
ハイドロ銀チタン®

ハイドロ銀チタン®(Hyd[AgTiO₂])
 テクノロジーは、約1,000の病院の
 空気清浄機フィルターに使用されて
 いる技術です。

防御フィルターでPM2.5もブロック
ハイドロ銀チタン®マスク


フィルター性能

PFE:平均99%(0.1μm微粒子捕集効率試験)[※]
 BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)[※]
 VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)[※]
 TE粉粒子:平均99%(花粉捕集効率試験)[※]

※試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター

マークとHyd[AgTiO₂]+5表記がある面を外側にして装着してください。

ブランド維持のため特殊印刷により文字の位置・濃淡は商品によって異なります。

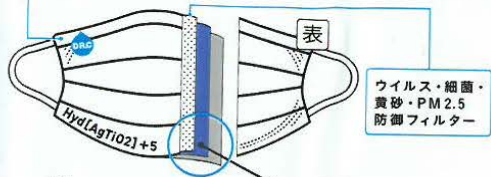



花粉・ハウスダストのタンパク質を水に変える



医師の新しい発想で生まれたハイドロ銀チタン®
 (Hyd[AgTiO₂])は、タンパク質を分解する新素材で
 す。花粉・ハウスダスト・カビ等のタンパク質や、汗・
 ニオイ・不衛生タンパク質を分解して水に変える、
 DR.C 医薬独自のクリーン技術です。

※汗・ニオイのタンパク質を分解

使用方法

-  上下裏表を確認して
 ノーズフィッターを
 鼻の形に合わせます。
-  顔の大きさに合わせて
 プリーツを上下に
 広げます。

⚠ 注意事項

- 表裏を逆にしますと分解機能が減弱しますので、間違えない様ご注意ください。
- 1日の連続着用時間は12時間以内を目安にしてください。
- 分解力による刺激で、頬・皮膚・口唇部・舌のしびれや赤味・ヒリヒリ感を感じる場合があります。その際は使用を一時的に中止すると改善しますが、再利用により刺激が悪化する場合は、使用を中止してください。
- ハイドロ銀チタン®は、光が無くても作用する触媒ですが、その性質上、光が当たると機能が上がります。それに伴い、時間経過によりマスクに色調変化が出現することがありますが、機能には問題なくお使いいただけます。
- 「数日間使用可能」「交換目安」は、製品内部にあるハイドロ銀チタン®加工不織布の推奨交換期間を指しており、マスク表面の衛生状態や使用可能日数を保証する目安ではありません。汚れやニオイが気になる場合は使用を中止してください。
- 目の上に乗せたり、中身を切って目や鼻に入れたりしないでください。
- 乳幼児・喘息様症状のある方は使用をお控えください。
- 洗濯は分解力が低下しますのでお控えください。
- 本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
- 火気のそばでの使用はお控えください。



安心カルテ登録ページへ▶

保管上の注意

■高温・多湿・直射日光・水気を避けて保管してください。■乳幼児の手の届かないところに保管してください。

品質表示

品名	マスク(ハウスダスト・花粉を水に変えるマスク)ふつうサイズ	対象	かぜ・花粉・ホコリ・ハウスダスト等
素材	本体・フィルター(ポリプロピレン・ポリエステル)・耳かけゴム(ポリエステル・ポリウレタン)・ノーズフィッター(ポリエチレン)		
入数	3枚入	サイズ	約160mm×95mm
		包装材	ポリプロピレン・アルミ

販売元 DR.C 医薬株式会社 東京都新宿区西新宿6-2-3

問い合わせ先 TEL:03-3340-1979 (受付時間:月~金(祝日除く)9:00~17:00)

http://www.drctiyaku.jp

MADE IN CHINA ハイドロ銀チタン®フィルター部分はDR.C 医薬(株)にて、日本で生産しております。



外装: PP, アルミ Lot.No. SH-1038



4 573407 430306

160+501