



5枚入

光の力で 分解するマスク

光触媒が太陽光・室内光で反応

マスク表面に付着した
菌やウイルス、花粉などが
二酸化炭素と水に変わる



			
花粉	菌・ウイルス	ハウスダスト	ニオイ

PFE・BFE・VFE99% カットフィルター採用

マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

光の力で分解するマスク
5枚入
PK-HB5M

1807211-18




表面に光触媒加工を
施した不織布を採用
光触媒が太陽光・室内光で反応し
マスク表面に付着した
「ウイルス」「花粉」「細菌」「におい」
などを二酸化炭素と水に分解



光触媒加工+ 99%カットフィルターの ダブル効果

※【試験機関：(一財)カケンテストセンター 測定】
BFE(かぜなどの咳やくしゃみの飛沫のろ過効率)試験
VFE(ウイルス飛沫ろ過効率)試験
PFE(微粒子ろ過効率)試験
花粉:花粉粒子のろ過効率試験

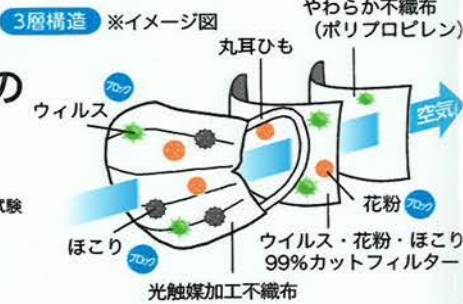

使用方法



①矢印のようにプリーツを開き
マスクが立体になるように広
げます。

②マスクを顔に当てて、ノーズ
フィッターを鼻の形に合わせ
ます。

③マスクをおさえ、耳ひもを掛
けます。

※顔とマスクの間にすき間が出ないよ
う、マスクの形を整えてください。

※耳ひもが取り付けられている方が内側です。
※ノーズフィッターのある方が上部です。

使用上の注意

●光によって変色する場合がありますが、品質には問題ありません。●金属に対
し、アレルギーが疑われる方はご使用をお控えください。●本品は使いきり商品です。洗濯による再使
用はできません。●本品は有害な粉塵やガスなどが
発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできませ
ん。●万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合は
ただちに使用を中止してください。●包装材特有の
においがすることがありますが、品質に問題はありませ
ん。●万一、においにより気分が悪くなった場合はただ
ちに使用を中止してください。●乳幼児の手の届かない
ところに保管してください。●湿気のない清潔な場
所に保管してください。●火気のそばでの使用はおや
めください。●本品を使用後はお住まいの自治体の
取り決めにしたがって廃棄してください。※商品の仕
様は予告なく変更す
ることがあります。

(一社)日本衛生材料工業連合自主基準による表示

品名	マスク(プリーツ型マスク)
対象	風邪、花粉、ほこりなど
素材	本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン 耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル ノーズフィッター:ポリエチレン
抗菌剤	酸化チタン(光触媒) 加工部位:表側の不織布より1層目
枚数	5枚
包装材の材質	外装:ポリプロピレン、アルミ 個包装袋:ポリプロピレン
製造販売者名	下部参照

MADE IN CHINA



アイリスオーヤマ株式会社

ヘルスケア事業部 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

暮らしに便利なお役立ち情報サイトはこちら

<http://www.iris-kurashi.com/>

アイリスコール お問い合わせはお気軽に(通話料無料)

0120-821-109

平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00/13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)
FAXでのお問い合わせは(通話料無料) 0800-888-2600
Webでのお問い合わせは <http://www.irisohyama.co.jp/support/>