



5枚入

光の力で 分解するマスク

光触媒が太陽光・室内光で反応

マスク表面に付着した
菌やウイルス、花粉などが
二酸化炭素と水に変わる



			
花粉	菌・ウイルス	ハウスダスト	ニオイ

PFE・BFE・VFE99% カットフィルター採用

マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

光の力で分解するマスク
5枚入
PK-HB5M

1807211-18




表面に光触媒加工を
施した不織布を採用
光触媒が太陽光・室内光で反応し
マスク表面に付着した
「ウイルス」「花粉」「細菌」「におい」
などを二酸化炭素と水に分解



光触媒加工+ 99%カットフィルターの ダブル効果

※【試験機関：(一財)カケンテストセンター 測定】
BFE(かぜなどの咳やくしゃみの飛沫のろ過効率)試験
VFE(ウイルス飛沫ろ過効率)試験
PFE(微粒子ろ過効率)試験
花粉：花粉粒子のろ過効率試験

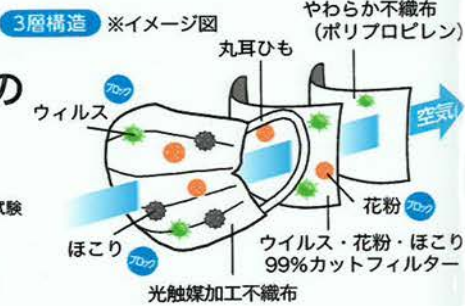

使用方法



①矢印のようにプリーツを開き
マスクが立体になるように広
げます。

②マスクを顔に当てて、ノーズ
フィッターを鼻の形に合わせ
ます。

③マスクをおさえ、耳ひもを掛
けます。

※顔とマスクの間にすき間が出ないよ
う、マスクの形を整えてください。

※耳ひもが取り付けられている方が内側です。
※ノーズフィッターのある方が上部です。

使用上の注意

●光によって変色する場合がありますが、品質には問題ありません。●金属に対
し、アレルギーが疑われる方はご使用をお控えください。●本品は使いきり商品です。洗濯による再使
用はできません。●本品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできませ
ん。●万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。●包装材特有の
においがすることがありますが、品質に問題はありません。●万一、においにより気分が悪くなった場合はただ
ちに使用を中止してください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●湿気のない清潔な場
所に保管してください。●火気のそばでの使用はおやめください。●本品を使用後はお住まいの自治体の
取り決めにしたがって廃棄してください。※商品の仕
様は予告なく変更す
ることがあります。



MADE IN CHINA

袋・個包装袋

アイリスオーヤマ株式会社

ヘルスケア事業部 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

暮らしに便利なお役立ち情報サイトはこちら

<http://www.iris-kurashi.com/>

(一社)日本衛生材料工業連合自主基準による表示	
品名	マスク(プリーツ型マスク)
対象	風邪、花粉、ほこりなど
素材	本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン 耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル ノーズフィッター:ポリエチレン
抗菌剤	酸化チタン(光触媒) 加工部位:表側の不織布より1層目
枚数	5枚
包装材の材質	外装:ポリプロピレン、アルミ 個包装袋:ポリプロピレン
製造販売者名	下部参照

アイリスコール お問い合わせはお気軽に(通話料無料)

0120-821-109

平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00/13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)
FAXでのお問い合わせは(通話料無料) 0800-888-2600
Webでのお問い合わせは <http://www.irisohyama.co.jp/support/>